




Příbalový leták

2019-nCOV IgG/IgM Rapid Test (LFA)
DNK-1419-1

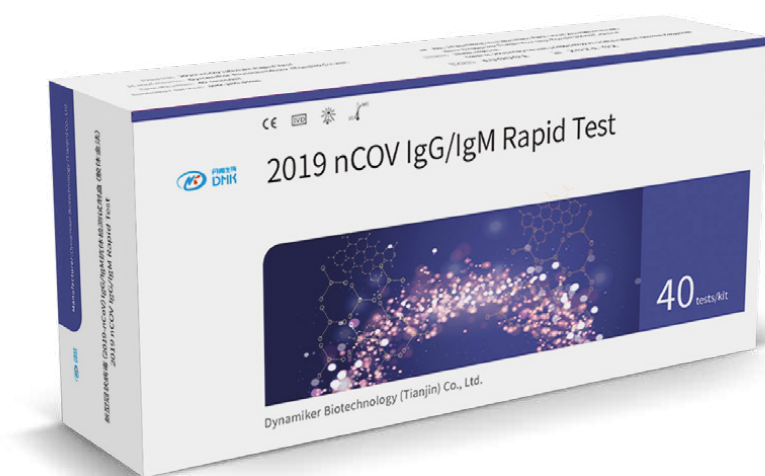

Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd.

Vyvinula ve spolupráci s Institute of Pathogen Biolog, Chinese Academy of Medical Sciences (Ústav biologie patogenů, Čínská akademie lékařských věd)

Vzorek: WB/S/P (celá krev/sérum/plasma)

Kombinace: IgG/IgM dva v jednom

Rychlost: TAT - 10 minut

Klinická validace: Přesnost větší než 92 %

CE IVD

Celá specifikace

1. Informace pro objednání


Kat.č.	Produkt	Formát	Čas	Vzorek	Balení
DNK-1419-1	2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test	kazeta	10 minut	celá krev/ sérum/ plasma	40 testů / balení

2. Klinický význam detekce IgG/IgM pro COVID-19

Podle protokolu pro diagnosu a ošetření COVID-19 (7. verze) je test na protilátky jedno z potvrzených diagnostických kritérií, pro pomoc diagnostice COVID-19. Je to velké vylepšení a doplněk PCR testu.

Běžně se IgM objevují v počáteční fázi infekce a IgG později a se zvýšeným titrem a ty pak mohou přetrvávat v krvi po dlouhou dobu. Pro kombinaci 2019-nCoV IgG/IgM testu poskytuje Národní centrum pro klinické laboratoře následující interpretaci:

IgG/IgM kombinovaný test pro podezření na COVID-19:

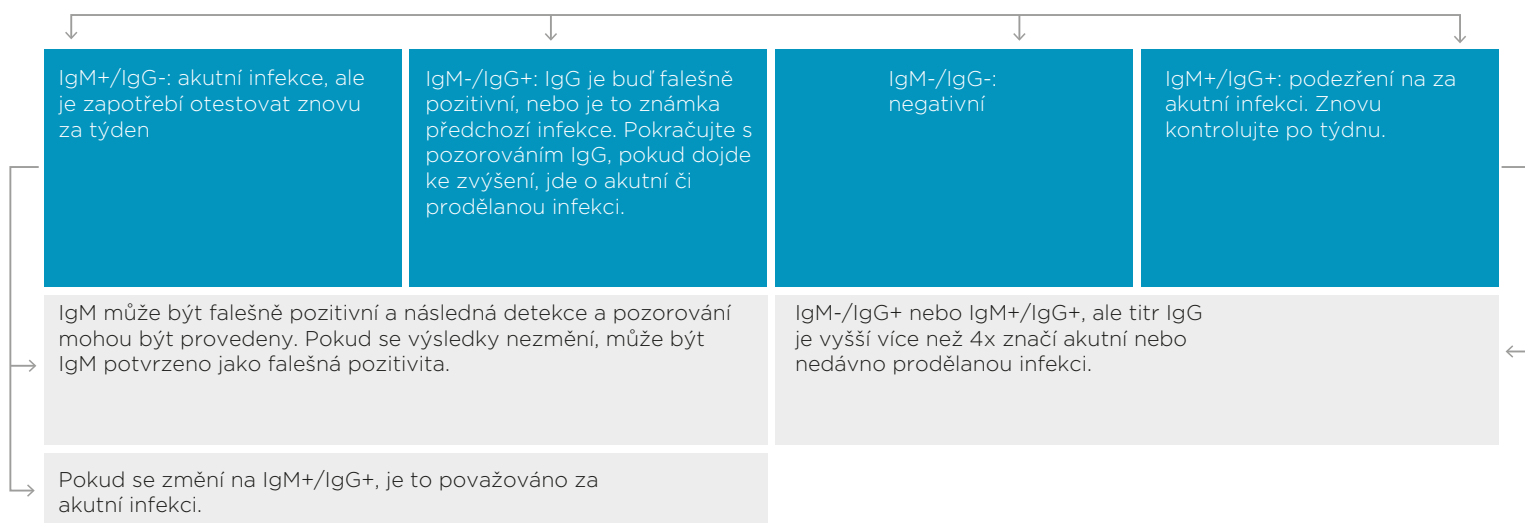

3. Jednoduchá manipulace

Sérum/plasma 10 µl
Celá krev 20 µl (jedna kapka)

60 µl (dvě kapky) pufru

Po deseti minutách odečtete výsledek

